



HTD CONSULTING

Novità! Monconi in Titanio "Simply Straight" con transfer in plastica per tecnica a cucchiaio chiuso

Comunicato Stampa

Alpha-Bio Tec è lieta di presentare i nuovi componenti e monconi in titanio "Simply Straight" (monconi per protesi cementata con transfer in plastica per tecnica a cucchiaio chiuso). Il transfer è compatibile con numerosi monconi con altezza gengivale da 1,0 - 2,0 - 3,0 e 4,0 mm.

Componenti del sistema:

	Monconi in Titanio "Simply Straight"				Transfer in plastica "Simply" (tecnica a cucchiaio chiuso)
Misure					



HTD CONSULTING

					
Cat. N°	5366	5367	5368	5369	5364
Codice	TLASP1	TLASP2	TLASP3	TLASP4	HTLASP
Altezza Gengivale	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	
Contenuto Confezione	1 moncone 1 vite	1 moncone 1 vite	1 moncone 1 vite	1 moncone 1 vite	1 Transfer
Materiale	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Plastica

Vantaggi del sistema:

- Semplicità d'uso per il Professionista ("Click and Go")
- Presa dell'impronta più precisa dal livello del moncone
- Presa dell'impronta più rapida
- Semplificazione della procedura per l'Odontotecnico

Indicazioni

- Protesi cementata su impianti (dente singolo o multipli)

Istruzioni per l'uso

Step 1 – Inserimento del moncone

- Misurare l'altezza dei tessuti molli e scegliere il moncone "Simply Straight" adeguato, in base all'altezza gengivale
- Posizionare il moncone sull'impianto e serrare la vite. Stringere il moncone con un torque di 30 Ncm.

Step 2 – Presa dell'impronta

- Posizionare il transfer "Simply Straight" sul moncone. La freccia posta in cima al transfer indica la parte piatta del moncone stesso
- Premere il transfer sul moncone. Il "click" ne indica il corretto posizionamento
- Procedere con un'impronta standard. Rimuovendola, il transfer si sgancia dal moncone e rimane all'interno dell'impronta



HTD CONSULTING

Step 3 – Invio dell'impronta al laboratorio

- Inviare l'impronta al laboratorio odontotecnico per la preparazione della protesi
 - Opzione A – Rimuovere il moncone dall'impianto, collegarlo all'impronta ed inviare l'impronta al laboratorio
 - Opzione B – Lasciare il moncone inserito nella bocca del paziente ed effettuare una protesi provvisoria senza fresare il moncone. Successivamente il laboratorio provvederà a connettere il moncone adeguato.

Informazioni:

HTD Consulting Srl

Via G. Marconi 6 int. 24 - 53013 Gaiole in Chianti (SI)

Tel. +39 0577 749047 - Fax. +39 0577 744693

info@htd-consulting.it

www.htd-consulting.it